



**ALL-IN-ONE**  
**PENDOLINO GEHLIFTER**

Die einzigartige Lösung für die Gangtherapie

# ALL-IN-ONE PENDOLINO GEHLIFTER

Der All-In-One Gehlifter ist ein Therapiegerät für die Förderung der normalen Gehmuster im Rahmen von Gangtherapie, Gleichgewichtstraining und Haltungstraining.

Der All-In-One-Gehlifter ist einmalig in seiner Funktion und Kombinierbarkeit. Es kommt das gleiche Grundgestell unserer normalen Patientenlifter zum Einsatz. Damit bleibt der Gehlifter kombinierbar als Patientenlifter oder Stehlifter. Eine besondere Hubgabel sorgt für Kopffreiheit und die höhenverstellbare Armstütze vermittelt Sicherheit und Unterstützung. Zusammen mit dem von uns, speziell für das Heben in den Stand, entwickelten Gurt kann der Patient sicher und bequem Gehtraining durchführen.



150kg Version



200kg Version

Der All-In-One-Gehlifter wird in zwei Gewichtsklassen geliefert: Tragfähigkeit 150kg und 200kg.

Die Funktionen sind die gleichen, jedoch verfügt die 150kg Version über eine Gestelllänge von 117cm und die 200kg Version verfügt über eine Gestelllänge von 122cm plus einen zusätzlichen integrierten Motor für die Funktion „Spreizen der Gestellausleger“.



Platzieren Sie den Gurt mittig am Rücken des Patienten während er in einem Stuhl oder Rollstuhl sitzt. Schließen Sie den Gurt am Bauch mit der Gurtschnalle und ziehen Sie den Gurt stramm, so dass es für den Patienten bequem ist. Nun ziehen Sie die Beingurte unter den Oberschenkeln durch und nehmen die jeweilige vor der Schulter befindliche obere graue Schlinge und ziehen diese durch die auf der gleichen Seite befindliche schwarze Oberschenkelschlinge einfach durch. Zum Schluß achten Sie bitte darauf, dass die vier grauen Schlingen nach oben alle die gleiche Länge haben und hängen diese dann in die Gabelösen ein. Jetzt können Sie mit dem Hebevorgang bis in den Stand beginnen.



Die besonders gestaltete Hubgabel gibt den Patienten direkt über ihren Schultern die notwendige Unterstützung. Dies bedeutet eine bessere Balance und Sicherheit für den Patienten.

Der Patient ist in der Lage, über das Gerät hinweg zu blicken. Der Gehlifter mit seiner offenen Konstruktion bietet folgende Vorteile für den Patienten:

- Aufnahme des Patienten aus der Sitzstellung
- Höhe stufenlos an den Patienten anpassbar
- Sichere und bequeme Gurtaufnahme
- Stabilität durch 4-Punkt-Aufhängung
- Gewichtsentlastung für den Patienten
- Der Gehlifter ist sehr wendig
- Gangtherapie ist abgesichert gegen Sturz
- Der Gehlifter passt durch Türen
- Patientengewicht bis zu 200kg
- Es reicht die Betreuung durch einen Therapeuten
- Heben der Patienten ohne im Gurt zu rutschen
- Sinnvolle Mobilisierung der Patienten



Der Spezialgurt ermöglicht die komfortable Unterstützung des Patienten und die Sturzgefahr ist gebannt.

Der Gehlifter ist mit zwei Richtungsfeststellern ausgestattet um Geradeauslauf bei Bedarf zu gewährleisten.

Gehlfliher-Set



Stehlfliher-Set und  
Patientenlfliher



Durch werkzeugloses Umstecken der Hubbügel und der Stützadapter läßt sich der Gehlfliher in einen Lifter oder Stehlfliher verwandeln (optionales Zubehör).

\* Stehlfliher-Set und Lifterarm für Patientenlfliher als Zubehör erhältlich.



Stehlfliher



Patientenlfliher

## BESTELLINFORMATION

### BEST. NR. BESCHREIBUNG

25-20035	All-In-One Gehlfliher 150kg
25-20526	All-In-One Gehlfliher 200kg
25-20135	All-In-One Gehlfliher-Set (für All-In-One Patienten- oder Stehlfliherlifter)

25-45021	Gehlfliher Gurt S
25-45022	Gehlfliher Gurt M
25-45023	Gehlfliher Gurt L
25-45024	Gehlfliher Gurt XL

Armstütze Höhe- einstellbar	75-105cm
Armstütze Breite	70cm
Höchste Hubhöhe	105-200cm
Sichere max. zulässige Traglast	150kg/200kg
Gesamtlänge	117cm/122cm
Gesamthöhe der Füße	12cm
Breite bei gespreiztem Fuß	109cm/133cm
Gesamtgewicht	51kg/54kg
Hebevorgänge pro Aufladung	za. 60/30



Lunavis GmbH & Co. KG  
21337 Lüneburg  
info@lunavis.de  
www.lunavis.de  
tel.: 04131 768360

# ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

### Ropox A/S

Ringstedgade 221  
DK-4700 Naestved  
Tel. +45 5575 0500  
Fax +45 5575 0550  
info@ropox.dk  
www.ropox.de