



Ropox SlimLine Elektrisch

BENUTZERHANDBUCH

Soll immer das Produkt begleiten

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation	2
Allgemeine Produktinformation	2
Technische Daten	2
Anwendung	3
Maßskizzen	4
Einbaugrenzflächen	5
Anordnung von Wasser, Ablauf und Elektrizität	7
Anschlussadapter	8
Reinigung/Pflege	9
Montageinformation	10
Komponentenliste	11
Montageanleitung	14
Kabeldiagramme	26
Benutzerinformation	27
Funktionsprüfung	28
Etikette	27
Symbolübersicht	27
Sicherheitshinweise	28
Serviceinformation	29
Fehlersuche	29
Wartung	30
Funktionsprüfung	30
Wartungsschema	31
Ersatzteile	32
Reklamation	33

Produktinformation

Allgemeine Produktinformation

Die höhenverstellbare Einheit Ropox Slimline bietet dem Benutzer das größte Erlebnis in der minimal möglichen Verpackung an. Mit ihrer Tiefe von nur 58mm nimmt die Höhenverstellung keinen unnötigen Raum im Badezimmer ein und bietet einen eleganten Ausdruck an.

Mit einem Höhenbereich von 300mm kann die elektrische Höhenverstellung die Bedürfnisse von sowohl stehenden als sitzenden Benutzern erfüllen. Mit der Positionierung der Höhenverstellung an der Wand entsteht mehr Raum unter dem Waschbecken für Fußstützen der Rollstuhlbenutzer.

Diese Anleitung muss immer dem Benutzer zugänglich sein und bei Umstellung das Produkt begleiten.

Technische Daten

Produktname:	Ropox Slimline Electric
Artikelnummer:	40-15601 Einheit mit Ropox Support Waschbecken
Höhenverstellung:	30 cm (70-100cm)
Stromversorgung:	230V, 50Hz, max. 2.9A
Einschaltdauer:	Max. 10 % = 2 Min. aktiv/18 Min. Pause
IP-Sicherung:	Alle elektrischen Komponenten sind nach IPX6 zertifiziert
Materialien:	Rahmen: Geschweißte Stahlrohre St. 37 pulverbeschichtet Waschbecken: Kunststoff-/Marmor-Komposit Abdeckung: Vakuumgeformtes Plexiglas
Oberflächenbehandlung:	Chromiert, Gelschicht
Max. Belastung:	Geprüft gemäß den Normen DS/ISO 17966 mit einem max. Benutzergewicht von: 40-15601: 165kg 5-40° C
Anwendungstemperatur:	Ropox A/S
Hersteller:	DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 E-Mail: info@ropox.dk

Zweckbestimmung

Höhenanpassung der Waschelegenheit und Spiegelnutzung an die Körpergröße des auch sitzenden Benutzers.

Anwendung


Ropox Slimline Electric ist höhenverstellbar zur Erreichung der optimalen Arbeitshöhe für Benutzer sowie für Helfer.

Ropox Slimline Electric darf NICHT als Hebetisch oder Personenheber benutzt werden.

Höhenverstellung mit fester Standard-Bedienung




Handbedieneinheit mit Spiralkabel (Zukauf)

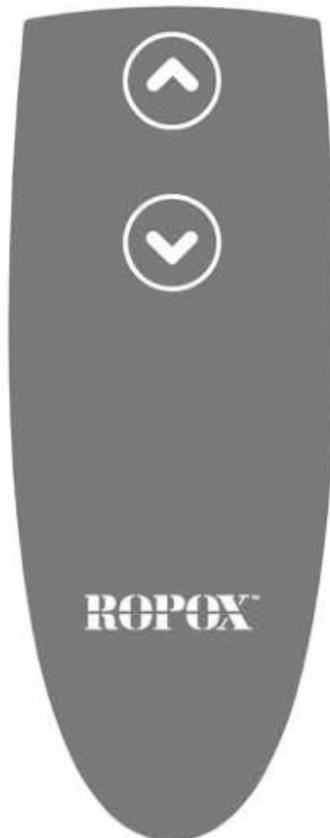

Maßskizzen

40-15601

700-1000mm Höhenbereich

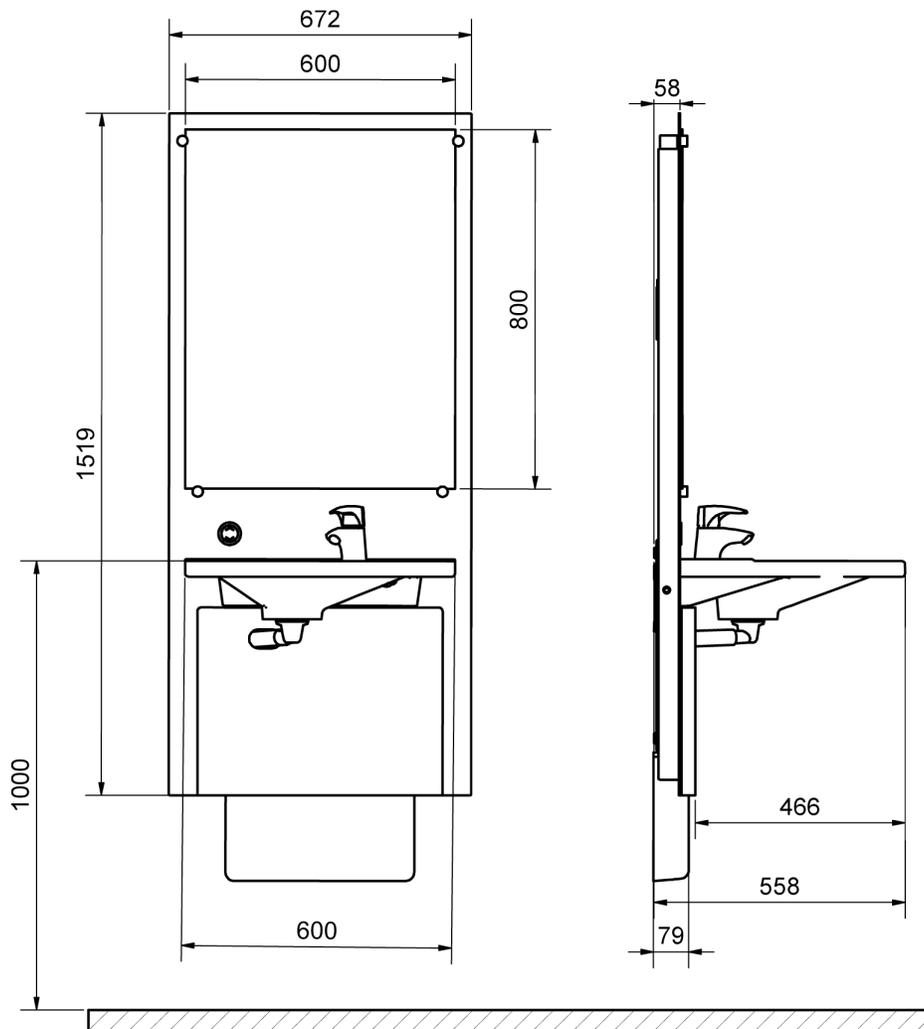

Einbaugrenzflächen

Die Beschaffenheit der Wand

Die Beschaffenheit der Wand im Badezimmer muss schraubenfest und für Nassräume zugelassen sein.


Das Produkt ist gemäß den Normen DS/ISO17966 belastungsgeprüft, und das maximale Benutzergewicht beträgt:

40-15601: 165 kg

40-15607: 200kg (mit einer Waschbecken aus Porzellan)

Max. Belastung der oberen Schrauben: 68kg/Schraube.

Mindestbereiche für Verstärkung der Wand sind die schraffierten Bereiche.

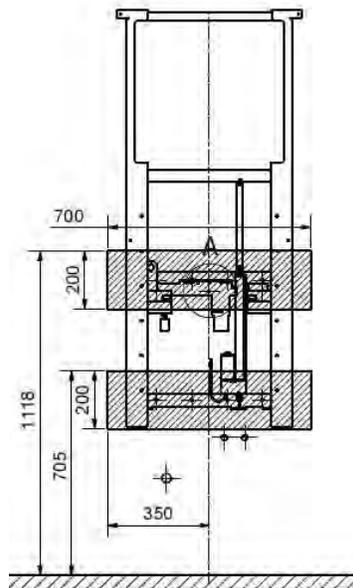

ELEKTRIZITÄT

Die empfohlene Anordnung der Wandsteckdosen ist über der Hebeeinheit, um Wasser und Spritzen zu vermeiden. Die Hebeeinheit wird mit einem Kabel von 200cm geliefert. Die Skizze zeigt die empfohlene Anordnung der Wandsteckdose.

SHK

Der Ablauf ist Ø32 und wird mit einem Ø32x88,5° Ablaufkrümmer abgeschlossen. Wegen Abdeckungen für Wasser und Ablauf dürfen Ablaufanschluss und Krümmer höchstens 77mm von der Wand hervorragen.


Die Wasserzufuhr wird mit 2 Stück 90° Absperrventilen mit ½" Außengewinde abgeschlossen. Der Wasseranschluss soll wie abgebildet angebracht werden. Für eine bessere Bewegung der Wasserschläuche empfiehlt es sich, den Wasseranschluss in 45° zu winkeln (vgl. Abbildung). Wegen Abdeckungen für Wasser und Ablauf dürfen Absperrventile höchstens 75mm von der Wand hervorragen.

Es empfiehlt sich, die Wasseranschlüsse und Abläufe wie abgebildet anzuordnen. Es ist wichtig, dass alle Schläuche für Wasseranschluss und Ablauf flexibel sind, so dass sich der Rahmen innerhalb des Höhenverstellungsbereichs von 70-100 cm (einschl. Waschbecken) ungehindert bewegen kann.

Der Ablauf kann auch im Fußboden angebracht werden. In diesem Fall kann die innere Abdeckung (40-15610) aber nicht verwendet werden.

Anordnung von Wasser, Ablauf und Elektrizität

Wandsteckdose in einem Radius von bis zu 1500mm anordnen

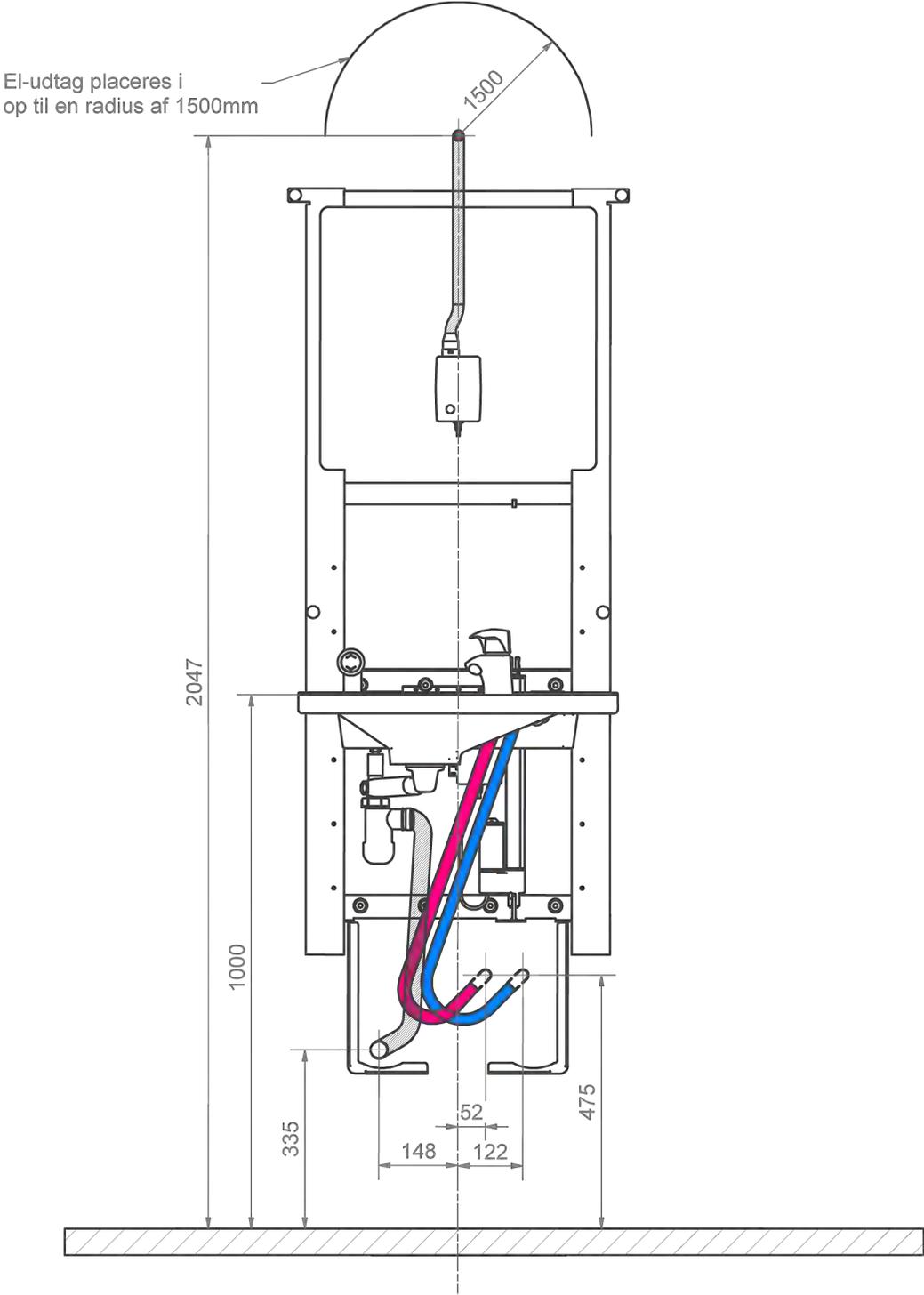

Anschlussadapter

Können die erwähnten Empfehlungen nicht erfüllt werden, sind die untenstehenden Komponenten erhältlich. Ropox ist dafür nicht verantwortlich, dass die untenstehenden Komponenten unter Abdeckungen bei der Höhenverstellung der Einheit optimal funktionieren.

Wasseranschlussadapter

Schläuche vom Waschbecken	Adapter	Installation im Raum (nicht enthalten)
 1/2"	Kein Adapter notwendig	 1/2" Gewinde
	 1/2" -> 3/8" Art.-Nr. 97001670	 3/8" Gewinde
	 1/2" -> 15mm Art.-Nr. 97001666	 15mm Rohr

Schlauchverlängerung

Schlauch vom Waschbecken	Kupplungsteil	Extra Schlauch
	 1/2" -> 1/2" Art.-Nr. 97001662	 1/2" x 1/2", 0,5m, Stahl Art.-Nr. 97001123
		 1/2" x 1/2", 1m, Kunststoff Art.-Nr. 97001120

Ablaufadapter

Ablauf vom Waschbecken	Adapter	Installation im Raum (nicht enthalten)
 Ø32	Kein Adapter notwendig	 Ø32
	 Ø32 -> Ø40 Art.-Nr. 97001660	 Ø40
	 Ø32 -> Ø50 Art.-Nr. 97001661	 Ø50

Ablaufverlängerung

Ablaufschlauch vom Waschbecken	Verbindungsstufe	Extra Schlauch
 Ø32	 Ø32-Ø32 Art.-Nr. 97001662	 Ø32 Flexschlauch, 40-110cm Art.-Nr. 97001161
		 Ø32 Flexschlauch, 27-62cm Art.-Nr. 97001162

Reinigung/Pflege

Bei Verwendung der Einheit kann Verschmutzung vorkommen. Es ist sehr wichtig, dass das Waschbecken und die Hebeeinheit gemäß dieser Anleitung gereinigt werden.

Das Ropox SlimLine mit einem ausgewrungenen Lappen mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen. Nicht Ätz- oder Schleifmittel oder schleifende Lappen, Bürsten oder Schwämme verwenden.

Reinigung von Waschbecken

Das Waschbecken ist aus einem Verbundstoff aus Marmor und Kunststoffgranulat mit Gelschicht-Oberfläche hergestellt. Das ergibt eine harte und sehr verschleißfeste Oberfläche, die sich einfach reinigen lässt. Jeden Tag die Oberflächen mit Wasser reinigen und mit einem Lappen trocknen. Keine harten Schleifmittel verwenden, wie z.B. Stahlwolle, Scheuerpulver oder Schwefelsäure.

Ist das Wasser sehr kalkhaltig, werden oft am Waschbecken Kalkablagerungen vorkommen. Diese Ablagerungen mindestens einmal wöchentlich durch Verwendung eines Reinigungsmittels entfernen, das Zitronensäure, Essigsäure oder Phosphorsäure enthält. Das Reinigungsmittel je nach Stärke der Ablagerungen 5-10 Minuten einwirken lassen und danach mit einem weichen Scheuerschwamm sorgfältig reinigen.

Desinfektion kann mit Haushaltsspiritus durchgeführt werden.

Montageinformation

Komponentenliste

Slimline Hebeeinheit mit Waschbecken 40-15601

40*15601-040: **Hebeeinheit** **1 Stück**



97002454: **Spiegel 600x800x5** **1 Stück**



40*15601-084 **Abdeckung oben** **1 Stück**



40*15601-062 **Abdeckung unten** **1 Stück**



40-15610 **Installationsabdeckung*** **1 Stück**

(Zukauf für 40-15607)



97002671 **Stellantrieb** **1 Stück**



97002674 **Feste Bedienung** **1 Stück**



97002672 **Steuereinheit** **1 Stück**



97002679 **Stromversorgung** **1 Stück**



97002680 **AC Kabel 2m** **1 Stück**

97001706 **Oras Saga 3910F** **1 Stück**

(Zukauf für 40-15607)



40-15612-0 **SHK-Satz SlimLine** **1 Stück**

(Zukauf für 40-15607)



- 97001601 Prevox Siphon 1 Stück
- 97001162 Flexibler Ablaufschlauch ø32/32 Stutzen 1 Stück
- 97001035 32x88,5° weiß PP Wafix-Krümmen HT 1 Stück
- 97001126 Anschlussschlauch 700mm, Lindner 2 Stück
- 97001605 Prevox 100mm Verlängerung 1 Stück
- 95091070 Plattenschraube ø4,8x70 Kreuzschlitz A2. 1 Stück

40*15601-100 Montageteile Slimline Rahmen 1 Stück

- 95027578 Rahmenschraube 7,5x72 rostfrei 8Stück
- 95027576 Zebra "shark" Dübel 10x61 8Stück
- 95125035 Spannplattenschraube 5x35 3Stück
- 40-44170-1 Spiegelbeschlag 1Stück
- 96000170 Strips, schwarz 4,8/290mm 4Stück
- 40*15601-021 Montagebeschlag 1Stück
- 95041285 Bolzen M12x85 2Stück
- 95170512 Scheibe mit Fase M12 2Stück
- 97001467 Montageteile für Ifö Spira 60 1Stück
- 40*15601-095 Abstandshalter 8Stück
- 95020521 VERSENKTE INSEX Schraube M5x20 4Stück

97001582


60cm Gerade Stütze Waschbecken 1 Stück



Montageanleitung

Vor der Montage überprüfen, ob alle Teile der Komponentenliste geliefert worden sind.

Die maximale Belastung je Schraube beträgt 68kg. Die Beschaffenheit der Wand muss dieser Belastung widerstehen können.

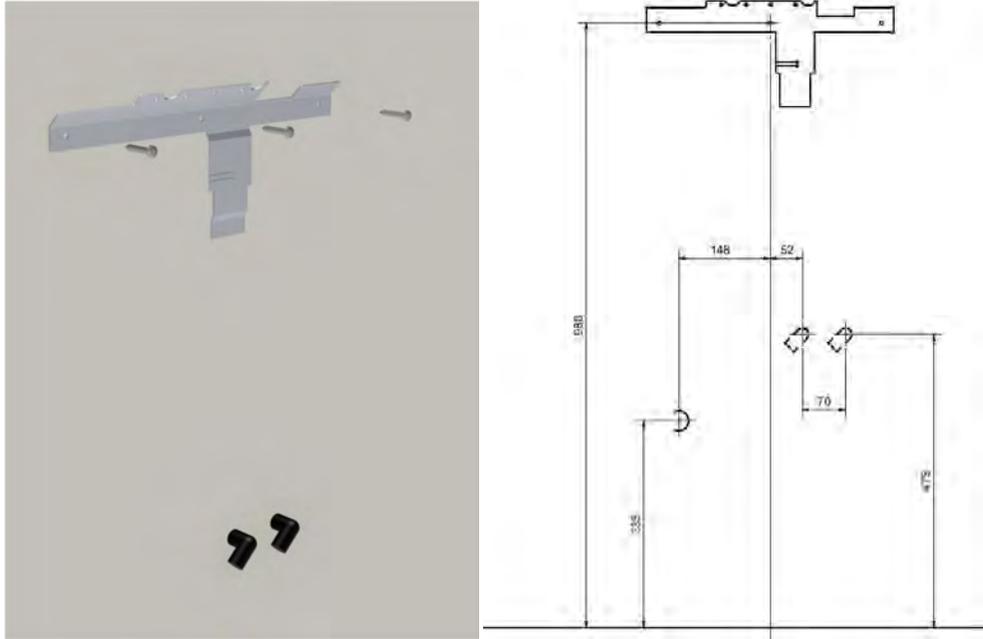


Wie abgebildet den Montagebeschlag mit dem korrekten Abstand zum Wasser und Ablauf anschrauben. Sicherstellen, dass der Montagebeschlag waagrecht ist.



Die Hebeeinheit an den Montagebeschlag hängen. Sicherstellen, dass M12 Bolzen für das Waschbecken im Rahmen montiert sind, bevor der Rahmen montiert wird.

Zentrumsloch für Montagebeslag

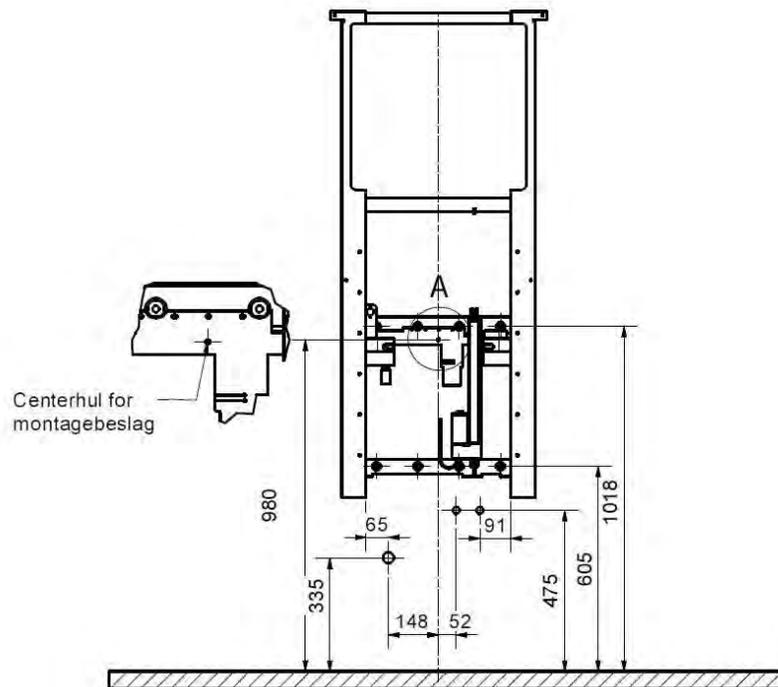


Die Einheit nach Wasseranschluss und Ablauf verstellen, vgl. Abbildung.




8 Stück Abstandhalter hinter den Rahmen schieben, so dass sein Abstand zur Wand korrekt wird.
Die 8 Befestigungslöcher markieren. Die Hebeeinheit wieder herunternehmen, und die Löcher in die Wand bohren.




Geeignete Dübel und Schrauben für die Montage verwenden.

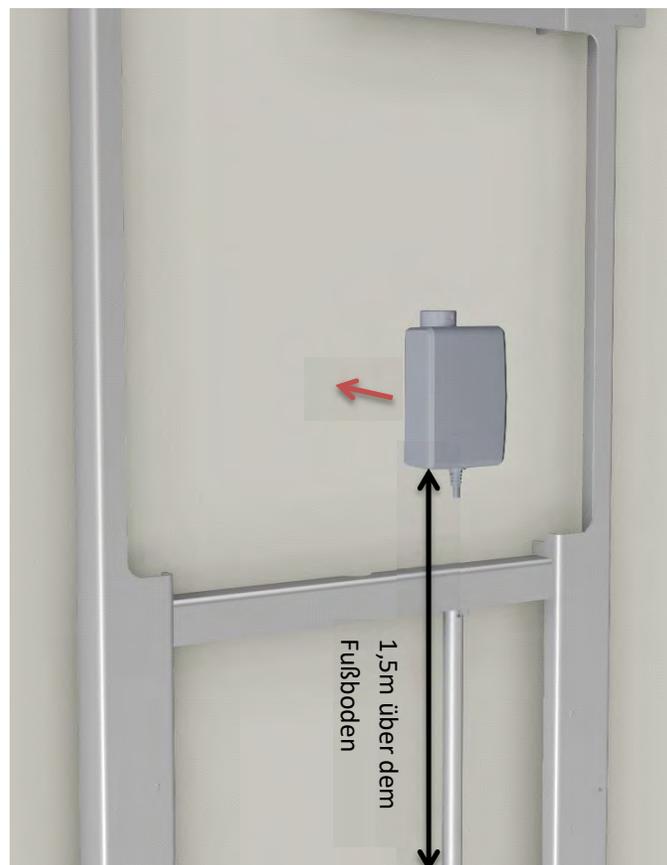

Die Schutzfolie vom Klebstreifen entfernen, und die Stromversorgung über der Einheit befestigen. 1,5m über dem Fußboden anbringen – gemessen auf der Unterseite. In der Mitte der Hebeeinheit anbringen.

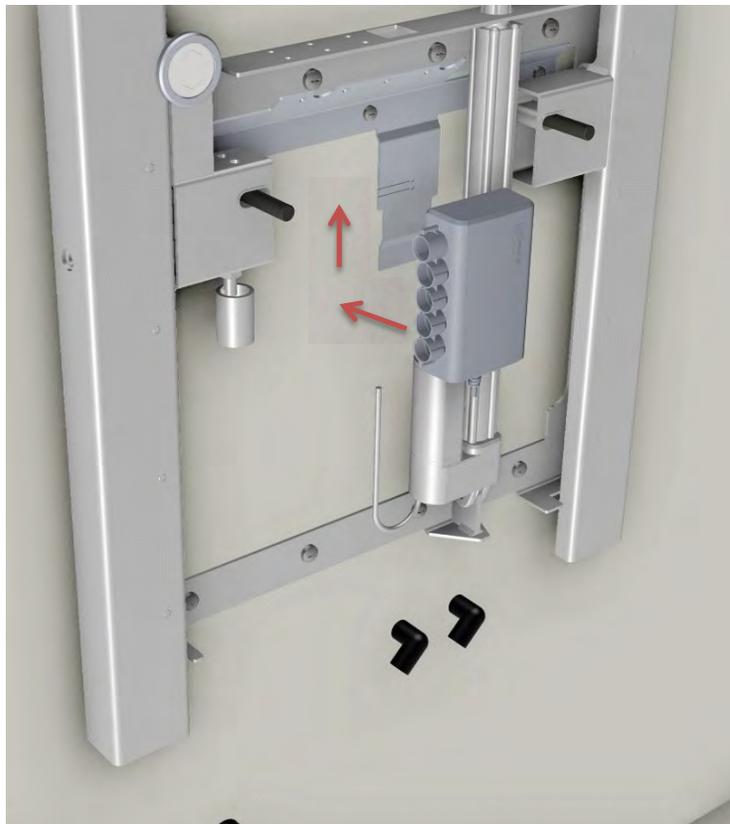

Die Steuereinheit auf den Montagebeschlag montieren. Beachten, dass das kleine Alubein eingreift und die

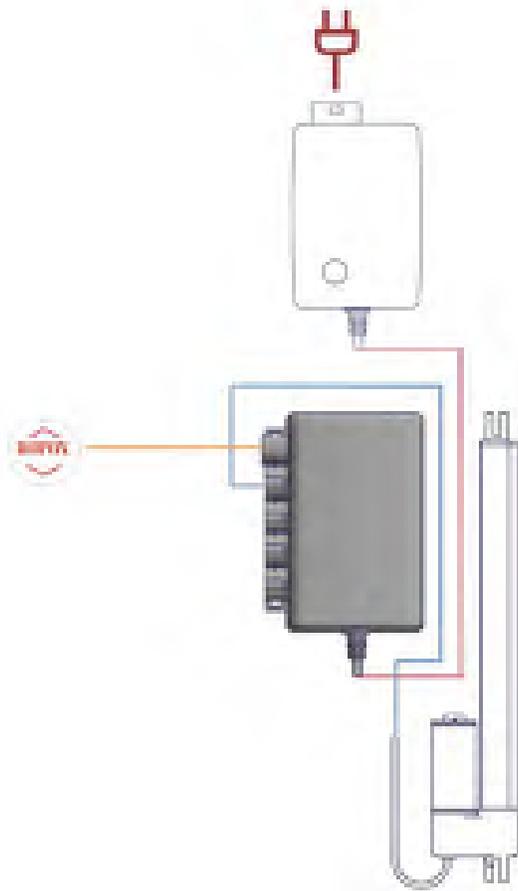




Das elektrische System wie abgebildet anschließen. Das überschüssige Kabel der Stromversorgung auf dem Montagebeschlag mit Strips befestigen.
Überprüfen, ob sich die Einheit ungehindert aufwärts/abwärts bewegen kann. Wenn nötig, Kabelklammer o.Ä. für das Stromkabel verwenden.



Die Stäbe für den Spiegelbeschriftung im Rahmen mit M5 versenkten Schrauben festschrauben.

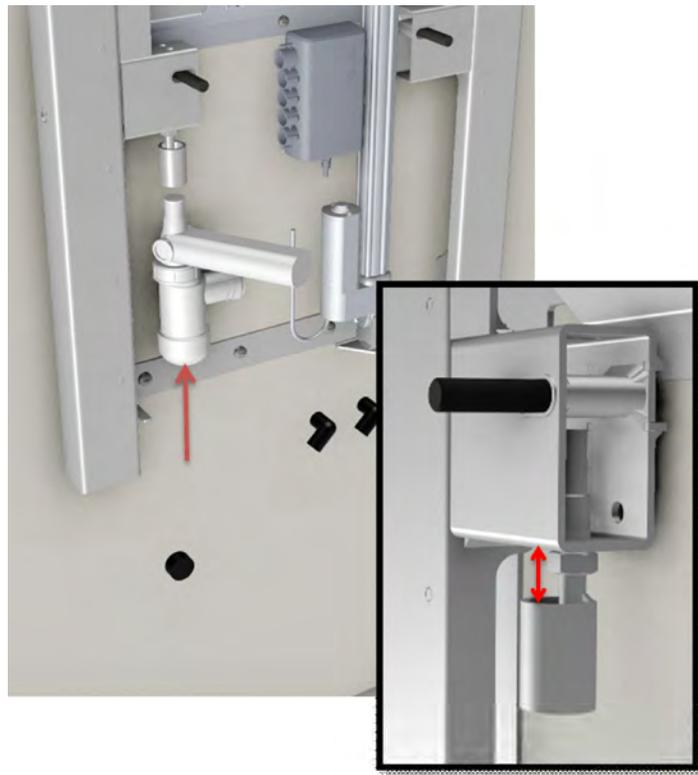

Den Siphon montieren. Den Halterbeschriftung zur korrekten Höhe für das benutzte Waschbecken einstellen, vgl. unten:
40-15620: 20mm
40-15622: 40mm



Die flache Kappe und 3 Stück Spiegelbeschläge montieren, so dass sie eingedrückt bleibt.



ACHTUNG! Bei der Montage vom Porzellanwaschbecken **MUSS** Entlastungsschaum zwischen Waschbecken und Einheit montiert werden. Siehe Bedienungsanleitung für Waschbecken anbei für weitere Information. Wir empfehlen, dass nachfolgend rund um das Waschbecken gefügt wird.

Jetzt das Waschbecken mit den beigefügten Montageteilen mit Bolzen montieren.




Die Schutzfolie vom doppelklebenden Klebstreifen auf der Rückseite der Beschläge für die Installationsabdeckung entfernen.

Jetzt diese in Position schieben, so dass sich die Beschläge an der Wand kleben.



Die Installationsabdeckung entfernen, und die Beschläge gut festdrücken, um sicherzustellen, dass der Kleber mit der Wand verbunden ist.

Wandsteckdose in einem
Radius von bis zu 1500mm
anordnen

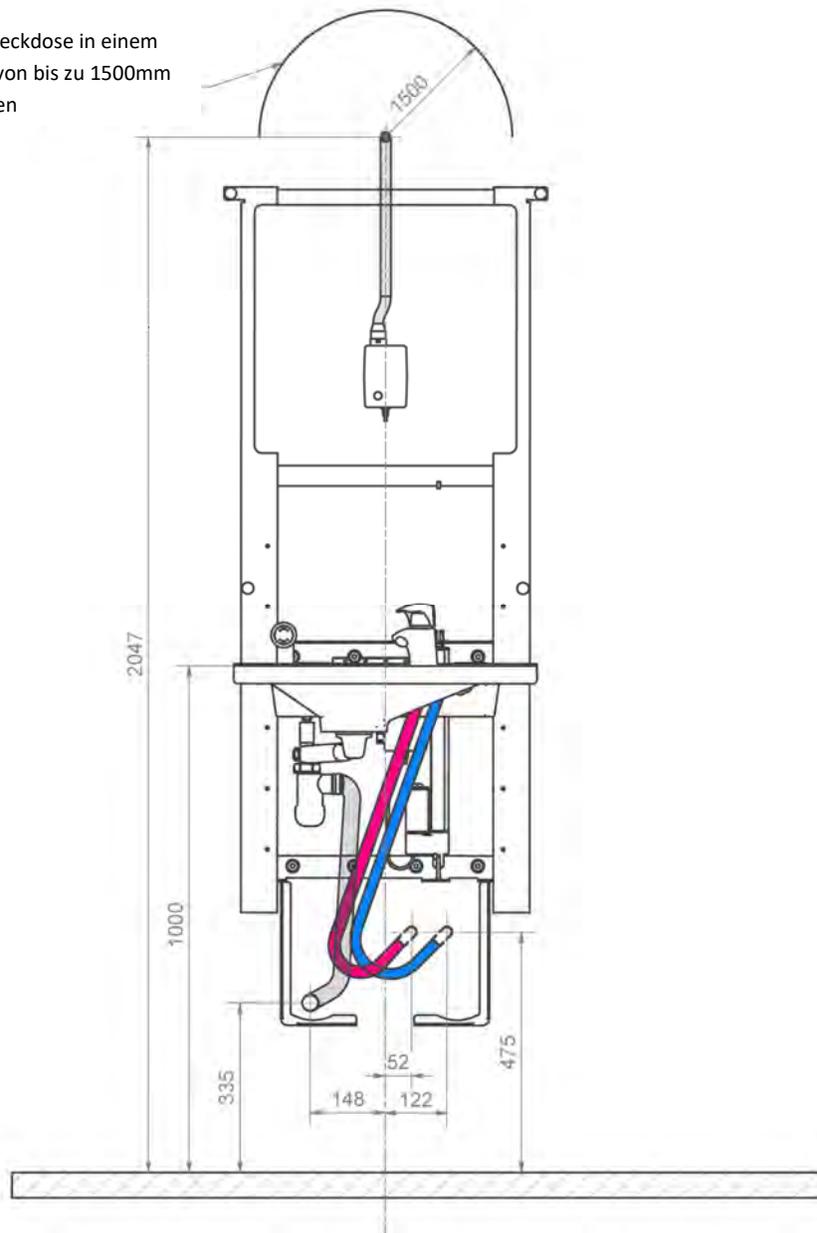

Wasser- und Ablaufschläuche wie abgebildet montieren. Die Installationsabdeckung wieder montieren. Überprüfen, ob sich alle Schläuche ungehindert bewegen können.



Die Außenkappe wie abgebildet montieren.




Den restlichen Ablauf montieren und im Waschbecken befestigen.
Jetzt durch Heben und Senken der Hebeeinheit überprüfen, ob sich das Waschbecken und die Schläuche unter den Kappen ungehindert bewegen können.



Die Schutzfolie auf dem doppelklebenden Klebstreifen auf der Rückseite des Spiegels entfernen und wie abgebildet ankleben. Gut festdrücken, und sicherstellen, dass der Spiegel angeklebt wird, so dass der letzte Spiegelbeschlag montiert werden kann.

Kabeldiagramme


Standardprodukt mit fester Bedienung.

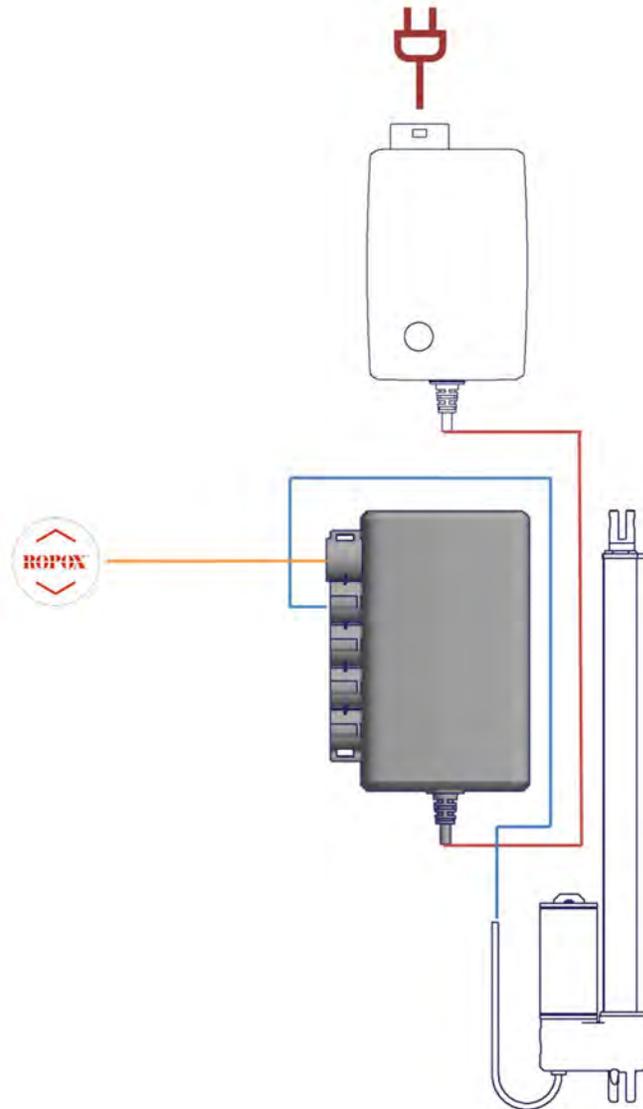

Benutzerinformation

Produkt mit fester Bedienung und Handbedieneinheit.

Hier wird ein Schlitzkabel benutzt.

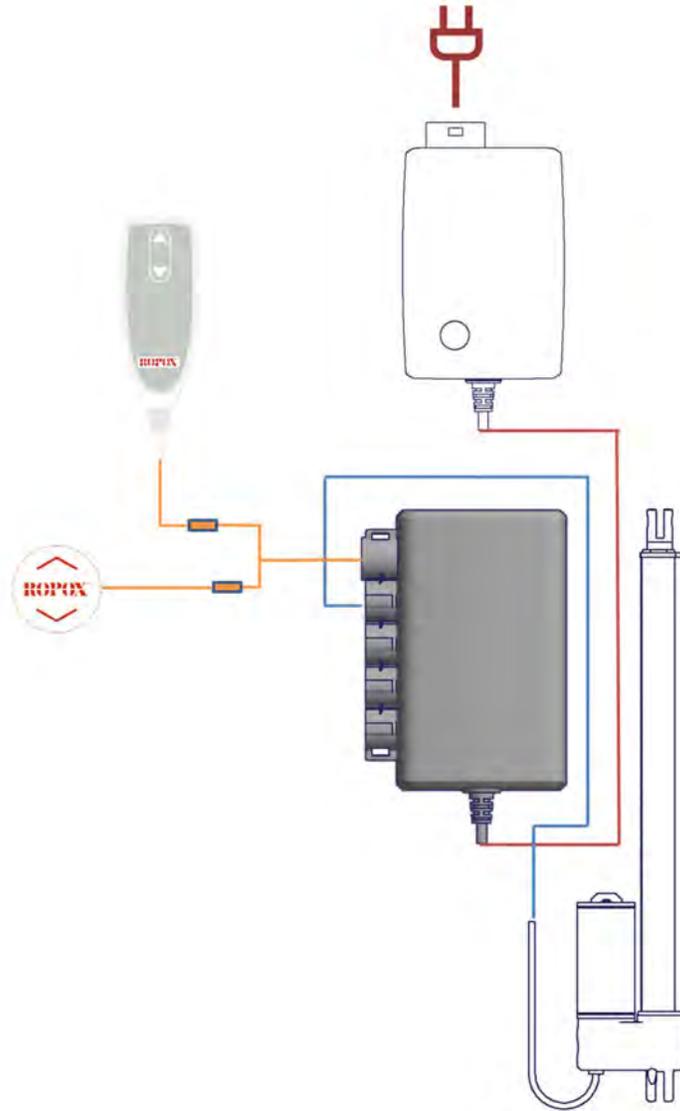

Funktionsprüfung


Nach beendeter Montage und vor Ingebrauchnahme müssen alle Funktionen des Ropox Slimline Waschbeckens geprüft werden. Danach ist mindestens einmal jährlich von kompetentem Personal eine Funktionsprüfung durchzuführen:


1. Überprüfen, ob die Montageanleitung eingehalten worden ist.
2. Überprüfen, ob alle Bolzen angezogen worden sind.
3. Sicherstellen, dass alle Ablauf- und Anschlussschläuche korrekt verbunden sind.
4. Sicherstellen, dass der Rahmen nicht belastet ist, und dass keine Gegenstände die Bewegung des Rahmens hindern.
5. Sicherstellen, dass keine Gegenstände die Bewegung des Rahmens innerhalb des Höhenverstellbereichs hindern.

Nach erfolgreicher Durchführung aller Punkte dieser Funktionsprüfung kann das Ropox Slimline in Gebrauch genommen werden. Siehe den Abschnitt **„Sicherheitshinweise“**.

Etikette

Jedes Produkt hat seine eigene Etikette (wie abgebildet). Diese Etikette enthält wichtige Informationen, die bei Anfragen an den Lieferanten anzugeben sind.

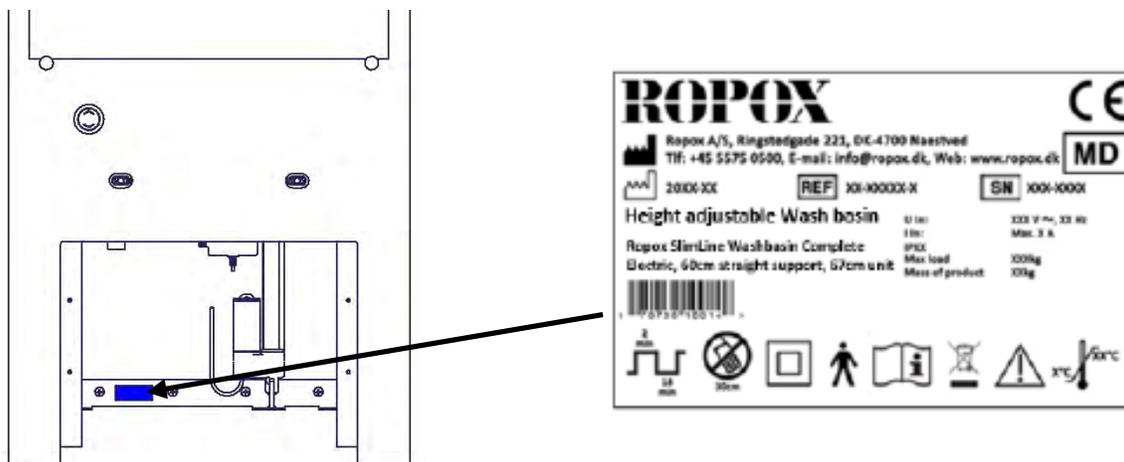

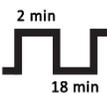	<p>Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung und entspricht somit der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, einschl. Änderungen in der Richtlinie 2007/47/EWG und der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.</p>
	<p>Hersteller Name und Adresse</p>
	<p>Herstellungsdatum</p>
	<p>Artikelnummer</p>
	<p>Seriennummer</p>
	<p>Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchna</p>
	<p>Einschaltdauer elektrisch betriebener Geräte. Die Benutzung von elektrisch höhenverstellbaren Geräten darf maximal 2 Minuten dauern, gefolgt von einer 18-minütigen Pause.</p>
	<p>Anwendungsteil Typ B. Das Produkt erfüllt die Anforderungen von IEC 60601-1 zum Schutz vor elektrischem Schlag.</p>
	<p>Schlagen Sie im Handbuch nach, um wichtige sicherheitsrelevante Informationen, Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen nachzulesen.</p>
	<p>Klasse II, doppelt isolierte elektrische Komponenten.</p>
	<p>Nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Das Produkt muss an einer ausgewiesenen Recyclingstation zurückgegeben werden.</p>
	<p>Mobiltelefone oder andere tragbare HF-emittierende Geräte sollten nicht näher als 30 cm vom Produkt entfernt sein.</p>
	<p>Betriebs- und Umgebungstemperaturen dürfen 5-40 C° nicht überschreiten</p>

Sicherheitshinweise

- Die Höhenverstellung des Ropox Slimline Electric Waschbeckens darf nur von Personen bedient werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Ropox Slimline Electric darf nicht als Hebetisch oder als Personenheber verwendet werden.
- Das Waschbecken immer so verwenden, dass Schäden an Personen oder Gegenständen vermieden werden.
- Bei der Verwendung in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten, wo sich insbesondere Kinder oder andere Personen mit reduzierter Beobachtungsfähigkeit befinden, muss die Person, die das Waschbecken bedient, äußerst aufmerksam sein, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass über und unter dem Waschbecken Platz für die Höhenverstellung vorhanden ist.
- Die Höhenverstellung des Ropox Slimline Electric Waschbeckens nicht bei Fehlern oder Schäden benutzen.
- Jede Änderung des Ropox Slimline Electric Waschbeckens, die auf die Funktionalität oder den Aufbau des Waschbeckens einwirken könnte, ist nicht gestattet.
- Montage, Wartung und Reparaturen dürfen nur von kompetentem Personal ausgeführt werden.
- Bei Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen darf das Waschbecken nicht belastet sein.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Waschbecken bewegt sich nicht auf- oder abwärts bei Betätigung der Handbedieneinheit.	Überprüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> • 230V eingeschaltet und Netzspannung vorhanden ist. • der Motor mit der Steuereinheit verbunden ist. • die Bedieneinheit mit der Steuereinheit verbunden ist. • der Motor überlastet ist (Achtung: 2 Min. Betrieb – 18 Min. Pause).
Handbedieneinheit defekt.	Überprüfen, ob das Waschbecken mit einer anderen Bedieneinheit funktioniert.
Beim Drücken der Auf- oder Abwärts-Knöpfe wird von der Steuereinheit nur ein "Klicken" gehört. Keine Bewegung.	<ul style="list-style-type: none"> • Vielleicht sind die Stecker nicht korrekt montiert worden. • Alle Kabel von der Steuereinheit entfernen und wieder montieren. • Eventuell ist eine Zurückstellung erforderlich. Siehe die Anleitung unten.
Der Rahmen ist locker oder instabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Schrauben nachziehen, vgl. Montageanleitung.
Die Höhe des Waschbeckens kann nicht verstellt werden oder die Höhenverstellung ist sehr schwierig.	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen, dass keine Gegenstände die Höhenverstellung verhindern.
Das Wasser wird nur langsam aus dem Waschbecken abgelassen.	<p>Sicherstellen, dass der Siphon nicht verstopft ist. Wenn erforderlich, reinigen.</p> <p>Sicherstellen, dass der flexible Schlauch nicht so hoch an der Wand montiert ist, dass er einen zusätzlichen Siphon bildet.</p> <p>Sicherstellen, dass Anschlusschläuche keine Knicke auf dem Schlauch bilden. Die Schläuche verstellen, so dass keine Knicke gebildet werden.</p>

Zurückstellung: Den Aufwärts- (▲) und Abwärts-Knopf (▼) gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Den Druck für etwa 10 Sek. halten. Danach kann das Waschbecken für Zurückstellung in die untere Position verstellt werden.

Wartung



Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen müssen von kompetentem Personal durchgeführt werden

Der Rahmen des Ropox Slimline Electric Waschbeckens ist wartungsfrei. Bewegliche Teile sind dauergeschmiert. Aus Sicherheits- und Betriebssicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Funktionsprüfung.

Funktionsprüfung

Nach einem Monat

Überprüfen: Montage der Mischbatterie

Anschluss der flexiblen Schläuche – Wasserzufuhr und Ablauf

Einmal jährlich

Das Waschbecken in die obere Position verstellen und überprüfen:

- Ob alle Bolzen des Waschbeckens angezogen sind.
- Ob sich der Rahmen von der unteren bis zur oberen Position ungehindert bewegen kann.
- Ob Wasseranschluss- und Ablaufschläuche dicht und funktionsfähig sind und sich ungehindert bewegen können.
- Den Knopf ABWÄRTS (▼) drücken und das Waschbecken nach unten verstellen. Sicherstellen, dass die Bewegung ruhig und gleichmäßig verläuft, und dass die Schlauchverbindungen nicht eingeklemmt werden.
- Jetzt den Knopf AUFWÄRTS (▲) drücken und das Waschbecken in die obere Position verstellen. Sicherstellen, dass die Bewegung ruhig und gleichmäßig verläuft, und dass die Schlauchverbindungen nicht eingeklemmt werden.

Nach jeder Funktionsprüfung muss das Wartungsschema ergänzt werden. Siehe nächste Seite.



Bei Auswechslung von Teilen nur originale Ersatzteile von Ropox verwenden. Werden andere Ersatzteile benutzt, kann die Garantie ihre Gültigkeit verlieren.

Wartungsschema

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	


Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Service und Wartung	Seriennr.
Datum: _____	
Unterschrift: _____	
Kommentare: _____ _____	

Ersatzteile

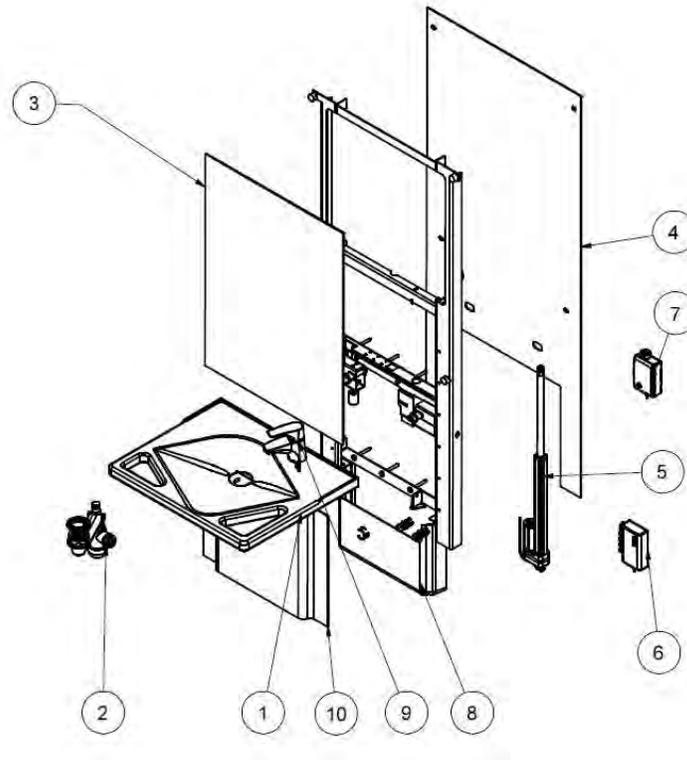

Position	Beschreibung	Anzahl im Produkt	Artikelnummer
1	60cm gerade Stütze Waschbecken Krankenhaus Waschbecken	1 1	40-15620 40-15622
2	SHK-Satz für SlimLine	1	40-15612
3	Spiegel 600x800x5	1	97002454
4	Obere Kappe	1	40*15601-084
5	Stellantrieb	1	97002671
6	Steuereinheit	1	97002672
7	Stromversorgung	1	97002679
8	Installationsabdeckung	1	40-15610
9	Oras Saga 3910F	1	97001706
10	Untere Kappe	1	40*15601-062
11	Bedienung	1	97002674

Reklamation

Siehe die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen auf www.ropox.dk.



Lunavis GmbH & Co. KG
21337 Lüneburg
info@lunavis.de
www.lunavis.de
tel.: 04131 768360

ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk

