



Ropox Dusch Sitz

Benutzerhandbuch

Verbleibt beim Produkt

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation	3
Varianten	3
Technische Daten	3
Maßskizzen	4
Gebrauchsanleitung	5
Hochklappen nach Gebrauch	5
Empfehlungen	5
Wartung	6
Reinigung	6
Fehlersuche	8
Abfallentsorgung	8
Faktoren, die auf die Funktion des Produktes einwirken	8
Kennzeichnung	9
Etikett	9
Zeichenerklärung:	9
Ersatzteile	10
Übliche Ersatzteile	10
CE-Kennzeichnung	11
EU – Konformitätserklärung	11
Richtlinie	11
Norm	11
Reklamationen	12

Produktinformation



Immer dieses Handbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.

Produkt: Ropox Duschklapsitz

Hersteller: Ropox A/S, DK-4700 Naestved, Tel. +45 55 75 05 00

Anwendungsbereich: Der Duschklapsitz ist im Hinblick auf Sitzkomfort und Entlastung für Personen während des Duschens entwickelt worden. Der Sitz kommt in Privatwohnungen, Pflegezentren oder ähnlichen Institutionen zur Sicherstellung des einfachen und komfortablen Gebrauchs und Transfer zum Einsatz.

Varianten

40-43016 Ropox Duschklapsitz



40-43011 Ropox Duschklapsitz mit Stützbeinen



Technische Daten


Sitzhöhe	Duschklappsitz mit Stützbeinen: 450 - 540mm
Materialien	Sitz: Rostfreier Stahl, Holz, PUR Schaum Wandunit: Rostfreier Stahl, PA 6.6, Federstahl, oberflächenbehandelter Stahl Stützbein: Aluminium, rostfreier Stahl, PA 6.6, TPU
Oberflächenbehandlung	Rostfreier Stahl: Pulverlackiert, weiß RAL 9003 matt Stahl: Blauchromat
Max. Belastbarkeit	Nach DS/EN 12182: max. Benutzergewicht 150kg (ohne Stützbeinen) und 200kg (mit Stützbeinen)




Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung und entspricht somit den grundlegenden Anforderungen betreffend Funktion und Sicherheit der geltenden Maschinenrichtlinie. Alle Varianten des Ropox Duschklappsitz sind gemäß den geltenden Forderungen der Richtlinie 93/42/EWG betreffend medizinische Ausrüstung hergestellt und gehören zur niedrigsten Risikoklasse 1. Siehe separate CE Erklärung Seite 11.

Maßskizzen

40-43016 Ropox Duschklappsitz

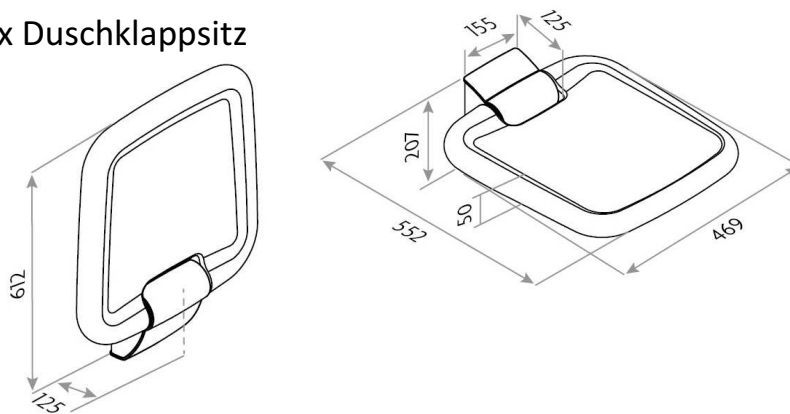

40-43011 Ropox Duschklappsitz mit Stützbeinen

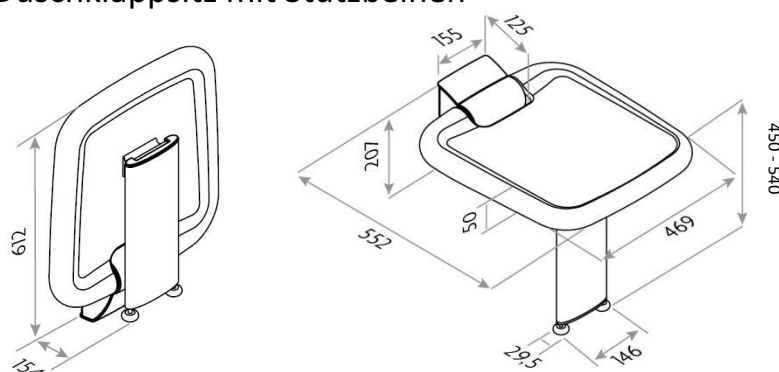

Gebrauchsanleitung

Hochklappen nach Gebrauch

Ropox Duschklappsitz hat einen eingebauten Federmechanismus zur Erleichterung des Hochklappens an die Wand nach Gebrauch.

Der Sitz verbleibt hochgeklappt und kann ebenfalls einfach herabgeklappt werden.

Empfehlungen

Zur Sicherstellung der optimalen Ausnutzung der Funktionen des Duschklappsitzes und zur Vermeidung von Unfällen müssen die untenstehenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

- Sicherstellen, dass die justierbaren Füße korrekt eingestellt sind, so dass sie beide beim heruntergeklappten Sitz den Fußboden berühren. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn der Fußboden uneben ist oder sich ein Rost o.ä. an den Füßen befindet.
- Nicht an das heruntergeklappte Stützbein stoßen (z.B. mit den Fußstützen eines Rollstuhls). Wird das Stützbein beschädigt, reduziert sich die maximale Belastbarkeit wesentlich.
- Sicherstellen, dass die Wand die daran zu befestigende Variante ohne Stützbeine tragen kann. Wenn nicht, die Variante mit Stützbeinen wählen oder die Wand verstärken.
- Beachten, dass der Sitz durch Wasser und Seife glatt werden kann.
- Wenn möglich, nicht auf dem Plastdeckel des Wandbeschlags sitzen.
- Sicherstellen, dass sich beim Herunterklappen keine Gegenstände unter dem Sitz befinden, da die Stützbeine dadurch beschädigt werden können.
- Überprüfen, ob alle Montageschrauben in der Wand korrekt und nicht in einer Fuge befestigt sind. Dadurch reduziert sich die Belastbarkeit des Sitzes.

Wartung

Ropox Duschklapsitz ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schrauben und beweglichen Teilen zur Sicherstellung, dass sie fest angezogen und die Befestigung an der Wand in Ordnung ist.

Reinigung

Nie für die Reinigung des Produktes einen Hochdruckreiniger benutzen. Einfach einen weichen Lappen oder Schwamm mit Seifenwasser (pH7) von höchstens 60°C verwenden.

Immer den Sitz nach Gebrauch reinigen, damit sich auf der Oberfläche kein Schmutz festsetzt.

Wichtig:

Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen oder scharfen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen nicht benutzt werden.

Der Sitz darf nicht mit Jod in Berührung kommen, da er dadurch verfärbt werden kann.

Für die Beständigkeit gegenüber sonstigen chemischen Stoffen siehe unten:

Chemical Resistance of PUR (Polyurethane)

Substance	Concentration (%)	Classification of requirement	Substance	Concentration (%)	Classification of requirement
Aceton		○	Magnesium chloride	30	●
Alums		○	Methanol	< 5	○
Aluminium chloride	10	●	Mythyl acetate		○
Formic acid	30	○	Mythyl chloride		○
Ammonia	10	●	Methylethylketon		○
Ammonium carbonate		○	Mythylglycol		○
Ammonium chloride		●	Mythylglycolacetate		○
Aniline		○	Lactic acid	10	○
ASTM-Oil I		●	Mineral oil		○*
ASTM-Oil II		●	Motor oil		○
ASTM-Oil III		●	Sodium chloride	10	●
ASTM-Fuel No. I		●	Sodium perchlorate solut.		●
ASTM-Fuel No. II		○	Soda lye	10	●
ASTM-Fuel No. III		○	Olive oil		●
Benzene		○	Ozone		●
Brake fluid ATE		○	Paraffin oil		●
Butanol		○	Perchlore ethylene		○
Butyl acetate		○	Petroleum ether		●
Calcium chloride	40	●	Petroleum		●
Chlorobenzene		○	Vegetable oils		●
Chloroform		○	Vegetable fats		●
Chloroprene		○	Phosphoric acid	50	○
Chromic acid		○	Nitric acid	30	○
Cyclohexan		○	Hydrochlorid acid, concen.		○
Cyclohexanon		○	Cutting oil		○*
Diethylether		●	Carbon disulfide		○
Diethylprestone		●	Sulfuric acid	30	●
Diesel oil		●	Sea water		●
Dimethylformamide		○	Silver salts	20	●
Ferric-III-chloride	10	●	Tetrachloroethylene		○
Acetic acid 20-80	10	○	Carbon tetrachloride	100	○
Ethanol	100	○	Tetrahydrofuran		○
Ethyl ether		○	Toluene		○
Ethylacetate		○	Trichlorethylene		○
Ethylencchloride		●	Tataric acid	< 10	●
Freon 12		○	Xylon		○
Freon 22		○			
Hydraulic oil SAE 90		○*			
Glycerin		●			
Glycol		●			
Isopropanol		○			
Potash lye	10	●			
Bichromate of potash		●			
Potassium nitrate		●			
Potassium permanganate		○			
Kerosene		●			

resistant	●
vastly resistant	●
conditionally resistant	○
not resistant	○

*for individual case, please verify

The information mentioned in this summary is given to the best of our own knowledge and based upon our long standing experience. But we would like to direct your attention to the fact, that the information is given without obligation. A final judgement can only be made in practice.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Abhilfe
Der Sitz bleibt nicht hochgeklappt	Feder innen evtl. defekt. In dem Fall neue Feder bei Ropox beziehen
Der Sitz ist beim Hochklappen ungewöhnlich schwer	Plastdeckel am Wandbeschlag demontieren. <ul style="list-style-type: none">• Sind die Federn locker, Federn beim hochgeklappten Sitz wieder befestigen• Sind eine oder beide Federn defekt, neue Teile bei Ropox beziehen
Der Sitz kann nicht völlig herabgeklappt werden und ist somit nicht waagrecht	Achtung: Nur für Variante mit Stützbeinen: <ul style="list-style-type: none">• Füße in korrekter Höhe justieren• Alternativ ist die Montagehöhe des Sitzes zu niedrig (siehe Montageanleitung für Mindestposition bei Wandmontage)

Abfallentsorgung



Die gebrauchte Ausstattung muss gemäß nationaler Gesetzgebung entsorgt werden. Wir empfehlen Zerlegung des Produktes, damit möglichst viele Komponenten wieder verwendet werden können. Beispiel für Sortierungsgruppen: Metall (Aluminium und Stahl für sich), Plast und Teile zur Verschrottung.

Faktoren, die auf die Funktion des Produktes einwirken





Temperatur: 0 °C bis 50 °C

Relative Feuchtigkeit: 5% bis 85% nicht kondensierend

Kennzeichnung

Etikett

Jeder Ropox Duschsitz hat ein eigenes Etikett wie abgebildet. Dieses Etikett enthält wichtige Informationen, die bei jeder Anfrage an den Lieferanten angegeben werden müssen. Die Abbildungen beziehen sich auf Sitze mit bzw. ohne Stützbeine.

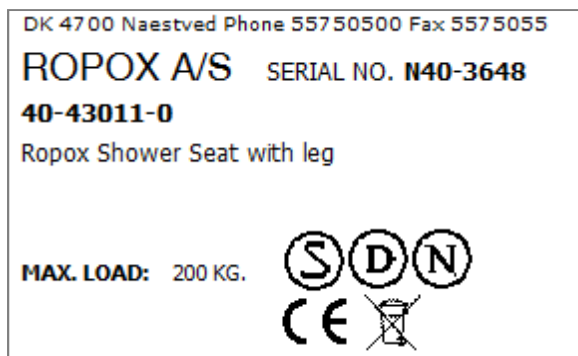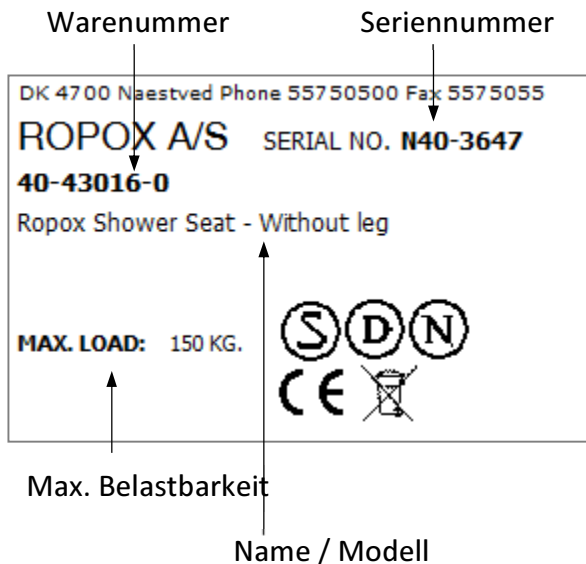

Zeichenerklärung

Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.



Abfälle sortieren – wenn möglich im Hinblick auf Wiederverwendung.



CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen betreffend General Safety and Functionality der relevanten EU-Richtlinien und Normen.

Ersatzteile

Übliche Ersatzteile

40-40018-013	Justierbare Füße	
40-43010-233	Plastdeckel für 40-43016	
40-43010-289	Plastdeckel für 40-43011	
40-43017-2	PUR Sitz	
40-43010-176	Blattfeder	
40-43010-216	Entlastungsfeder	

CE-Kennzeichnung

EU – Konformitätserklärung



Ropox erklärt hierdurch, dass die unten angegebenen Produkte

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 40-43016 | Ropox Duschklapsitz mit Stützbeinen |
| 40-43011 | Ropox Duschklapsitz ohne Stützbeine |

als Klasse I klassifiziert sind und der untenstehenden Richtlinie und Norm entsprechen:

Richtlinie


Richtlinie für Medizinische Ausrüstung 93/42/EWG (Risikoklasse 1)

Maschinenrichtlinie Nr. 2006/42/EG, abgeändert durch Richtlinie Nr. 98/37/EG.

Norm

- | | |
|--------------------|--|
| DS/EN 12182: 2012: | Hilfsmittel für funktionsbehinderte Personen -
Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode |
| DS/EN 14971: 2012 | Medizinprodukte –
Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte |
| DS/EN 9999: 2011: | Hilfsmittel für funktionsbehinderte Personen -
Klassifikation und Terminologie |

Datum: 30-06-2012



Tommy Jensen
Adm. direktør

Reklamationen

Alle Rückfragen betreffend Reklamationen sind an den Händler zu richten, der auf dem betreffenden Markt Ropox vertritt.

Vgl. Ropox Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Ropox A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 78 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk